

Oestrofact® SILVER protect

Vaginalni gel

(SRB)

Namena

Medicinsko sredstvo Oestrofact® SILVER protect je zaštitni krem-gel namenjen kao pomoć u prevenciji genitalnog herpesa, naročito kao profilaksa rekurentnih infekcija i kao pomoć u tretmanu bakterijskih, gljivičnih i virusnih infekcija, kao što su kandidijaza, polne bradavice (kondilomi) i kao pomoć u tretmanu postporođajnih lezija. Formira zaštitnu barijeru na leziji u cilju izolacije i zaštite tkiva od spoljnih štetnih agenasa.

Oestrofact® SILVER protect je krem-gel na bazi TIAB® kompleksa mikrokristalnog titanijum-dioksida sa kovalentno vezanim jonima srebra, čije je osnovno delovanje stvaranje barijere koja štiti tkiva i stvaranje najboljih uslova za sprečavanje rekurentnih bakterijskih, gljivičnih i virusnih infekcija, posebno usled prisustva herpesa.

Prisustvo dimetikonu u proizvodu značajno doprinosi efektu formiranja filma koji pomaže u stvaranju zaštitne barijere. Pored toga, zahvaljujući karakteristikama i pomoćnoj funkciji komponenata koje ulaze u sastav proizvoda, Oestrofact® SILVER protect postiže hidrantni efekat.

Aloe vera ima hidrirajuće, osvežavajuće i umirujuće delovanje, zahvaljujući prisustvu vitamina, minerala i aminokiselina, koji brzo olakšavaju tipične tegobe izazvane upalom, poput svraba i peckanja izazvanih herpesom ili prisustvom kandidate ili polnih bradavica (kondiloma); takođe, daje tonus i elastičnost tkivu, ubrzava proces zarastanja rana i pomaže u održavanju fiziološkog odbrambenog mehanizma.

Oestrofact® SILVER protect ima dvostruko dejstvo:

- izoluje regiju na koju se aplikuje od spoljašnjih štetnih mikrobioloških agenasa;
- ograničava kolonizaciju mikroorganizama u području regeneraciju tkiva.

Uputstvo za upotrebu:

- 1) Pre upotrebe, očistite površinu koja se tretira i dobro osušite.
- 2) Nanesite tanki sloj krem-gela na zahvaćeno područje.
- 3) Ne masirajte.

Način primene:

Nanosite proizvod jednom dnevno u trajanju od sedam

dana. Krem-gel treba nanositi na područja koja su obično pogodena bakterijskim, gljivičnim ili virusnim infekcijama, kada se jave prvi simptomi (svrab, peckanje, nelagodnost, itd.).

Upozorenja:

- Ne koristite proizvod u svrhe drugačije od onih navedenih u uputstvu;
- Pre nanošenja proizvoda pažljivo operite ruke;
- Nakon nanošenja, ne masirajte zahvaćeno područje i ostavite ga da se prirodno osuši, ostavite da krem-gel formira sloj zaštitnog filma;
- Izbegavajte kontakt sa očima. U slučaju kontakta odmah temeljito isperite vodom;
- Ne upotrebljavajte Oestrofact® SILVER protect nakon isteka roka upotrebe utisnutog na ambalaži;
- Čuvajte na sobnoj temperaturi daleko od izvora toplete;
- Ne zamrzavajte;
- Držite van domašaja dece;
- Ne koristite ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno;
- Nakon upotrebe, pravilno zatvorite tubu;
- Prestanite sa lečenjem u slučaju abnormalnih kožnih reakcija;
- U slučaju duže upotrebe, posavetujte se sa lekarom;
- Proizvod nema spermicidni niti kontraceptivni efekat.
- Zbog nedostatka posebnih podataka o korišćenju proizvoda tokom trudnoće ili dojenja, pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre nego što primenite Oestrofact® SILVER protect

Kontraindikacije:

Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja. Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na komponente.

Ne treba koristiti u kombinaciji sa drugom topikalnom terapijom.

Sastav:

Voda, PPG-15 stearyl etar, steareth-2, stearinska kiselina, glicerol, TIAB® (mikrokristalni titanijum-dioksid sa kovalentno vezanim jonima srebra), cetearyl alkohol, dimetikon, steareth-21, ekstrakt *Aloe barbadensis*, etilheksilglicerol, natrijum-hijaluronat, tokoferil-acetat, benzalkonijum-hlorid, heksamidin-diizetonat, dinatrijum-EDTA, natrijum-hidroksid.

Uslovi čuvanja

Držati dalje od vlage i toplete. Ako je izložen suncu, proizvod može poprimiti blago žutu nijansu; to ne utiče na njegovu funkcionalnost i karakteristike.

Pakovanje: Tuba od 25 ml

Samo za spoljašnju upotrebu

Datum revizije: mart 2020.

Oestrofact® SILVER protect

Vaginalni gel

(BIH/MNE)

Namjena

Medicinsko sredstvo Oestrofact® SILVER protect je zaštitni krem-gel namijenjen kao pomoć u prevenciji genitalnog herpesa, naročito kao profilaksa rekurentnih infekcija i kao pomoć u tretmanu bakterijskih, gljivičnih i virusnih infekcija, kao što su kandidijaza, polne bradavice (kondilomi) i kao pomoć u tretmanu postporođajnih lezija. Formira zaštitnu barijeru na leziji u cilju izolacije i zaštite tkiva od spolnih štetnih agenasa.

Oestrofact® SILVER protect je krem-gel na bazi TIAB® kompleksa mikrokristalnog titanijum-dioksida sa kovalentno vezanim jonima srebra, čije je osnovno djelovanje stvaranje barijere koja štiti tkiva i stvaranje najboljih uslova za sprječavanje rekurentnih bakterijskih, gljivičnih i virusnih infekcija, posebno usljed prisustva herpesa.

Prisustvo dimetikona u proizvodu značajno doprinosi efektu formiranja filma koji pomaže u stvaranju zaštitne barijere. Pored toga, zahvaljujući karakteristikama i pomoćnoj funkciji komponenata koje ulaze u sastav proizvoda, Oestrofact® SILVER protect postiže hidrantni efekat.

Aloe vera ima hidrirajuće, osvežavajuće i umirujuće djelovanje, zahvaljujući prisustvu vitamina, minerala i aminokiselina, koji brzo olakšavaju tipične tegobe izazvane upalom, poput svraba i peckanja izazvanih herpesom ili prisustvom kandidate ili polnih bradavica (kondiloma); takođe, daje tonus i elastičnost tkivu, ubrzava proces zarastanja rana i pomaže u održavanju fiziološkog odbrambenog mehanizma.

Oestrofact® SILVER protect ima dvostruko dejstvo:

- izoluje regiju na koju se aplikuje od spoljašnjih štetnih mikrobioloških agenasa;
- ograničava kolonizaciju mikroorganizama u području primjene, čime stvara najbolje moguće uslove za regeneraciju tkiva.

Uputstvo za upotrebu:

- 1) Prije upotrebe, očistite površinu koja se tretira i dobro osušite.
- 2) Nanesite tanki sloj krem-gela na zahvaćeno područje.
- 3) Ne masirajte.

Način primjene:

Nanosite proizvod jednom dnevno u trajanju od sedam

dana. Krem-gel treba nanositi na područja koja su obično pogođena bakterijskim, gljivičnim ili virusnim infekcijama, kada se javi prvi simptomi (svrab, peckanje, nelagoda, itd.).

Upozorenja:

- Ne koristite proizvod u svrhe drugačije od onih navedenih u uputstvu;
- Prije nanošenja proizvoda pažljivo operite ruke;
- Nakon nanošenja, ne masirajte zahvaćeno područje i ostavite ga da se prirodno osuši, ostavite da krem-gel formira sloj zaštitnog filma;
- Izbjegavajte kontakt sa očima. U slučaju kontakta odmah temeljito isperite vodom;
- Ne upotrebljavajte Oestrofact® SILVER protect nakon isteka roka upotrebe utisnutog na ambalaži;
- Čuvajte na sobnoj temperaturi daleko od izvora toplote;
- Ne zamrzavajte;
- Držite van domašaja djece;
- Ne koristite ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno;
- Nakon upotrebe, pravilno zatvorite tubu;
- Prestanite sa liječenjem u slučaju abnormalnih kožnih reakcija;
- U slučaju duže upotrebe, posavjetujte se sa lekarom;
- Proizvod nema spermicidni niti kontraceptivni efekat.
- Zbog nedostatka posebnih podataka o korišćenju proizvoda tokom trudnoće ili dojenja, pitajte svog lekara ili farmaceuta za savjet prije nego što primijenite Oestrofact® SILVER protect

Kontraindikacije:

Nisu zabilježeni slučajevi predoziranja. Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na komponente.

Ne treba se koristiti u kombinaciji sa drugom topikalnom terapijom.

Sastav:

Voda, PPG-15 (stearil etar, steareth-2, stearinska kiselina, glicerol, TIAB® (mikrokristalni titanijum-dioksid sa kovalentno vezanim jonima srebra), cetearyl alkohol, dimetikon, steareth-21, ekstrakt *Aloe barbadensis*, etilheksilglicerol, natrijum-hijaluronat, tokoferil-acetat, benzalkonijum-hlorid, heksamidin-diizetonat, dinatrijum-EDTA, natrijum-hidroksid.

Uslovi čuvanja

Držati dalje od vlage i toplote. Ako je izloženo suncu, proizvod može poprimiti blago žutu nijansu; to ne utiče na njegovu funkcionalnost i karakteristike.

Pakovanje: Tuba od 25 ml

Samo za spoljašnju upotrebu

Datum revizije: mart 2020.