

Oestrofact® SILVER protect

Meke vaginalne kapsule

(SRB)

Oestrofact® SILVER protect meke vaginalne kapsule stvaraju zaštitnu barijeru sa ciljem da izoluju i štite tkivo od iritirajućih agenasa čime se pospešuje održavanje i obnavljanje normalnog fiziološkog stanja vaginalne sluznice.

Oestrofact® SILVER protect kapsule koriste se u tretmanu bakterijskih, gljivičnih i virusnih infekcija.

Oestrofact® SILVER protect je medicinsko sredstvo sa dvostrukim dejstvom:

- izoluje tretirano područje štiteći ga od spoljašnjih patogenih mikroorganizama
- ograničava kolonizaciju mikroorganizama na tretiranoj površini, stvarajući idealne uslove za obnavljanje prirodnog fiziološkog stanja vaginalne sluzokože

Oestrofact® SILVER protect vaginalne kapsule su brzo otapajuće želatinske kapsule.

Uputstvo za upotrebu:

1. Pre upotrebe operite intimnu regiju.
2. Umetnite meku kapsulu duboko u vaginu.
3. Ponavljajte primenu jednom dnevno tokom sedam dana.

Medicinsko sredstvo Oestrofact® SILVER protect meke vaginalne kapsule, treba primeniti kada se jave prvi simptomi kao što su: svrab, peckanje, neprijatnost i sl. Nije neophodno prekidati eventualnu uporednu primenu topikalne terapije.

Upozorenja:

- Sredstvo koristite samo u slučaju da epitel nije oštećen
- Ne koristite proizvod u svrhe drugačije od

- onih navedenih u uputstvu
- Pre upotrebe pažljivo operite ruke
- Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka upotrebe navedenog na kutiji
- Čuvajte na sobnoj temperaturi i dalje od izvora toplote
- Ne zamrzavajte
- Držite van domašaja dece
- Samo za lokalnu upotrebu - ne gutati
- Ne koristite ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno
- Ne koristite u slučaju poznate preosetljivosti na bilo koju od komponenata
- Prekinite tretman u slučaju abnormalnih kožnih reakcija
- U slučaju duže upotrebe konsultujte se sa lekarom
- Proizvod nije spermicid niti kontraceptiv

Kontraindikacije:

Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja.

Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na komponente.

Nisu poznate interakcije sa lekovima i drugim lekovitim supstancama.

Uslovi čuvanja:

Držati dalje od vlage i toplote. Ako je izložen suncu, sadržaj može poprimiti blago žutu nijansu, što ne utiče na njegove funkcionalne karakteristike i rok upotrebe.

Sastav:

Kaprilni/kaprinski trigliceridi, gliceril-stearat, PEG-6 stearat (i) glikol-stearat (i) PEG-32 -stearat, ekstrakt Aloe barbadensis, TIAB® (mikrokristalni titanijum-dioksid sa kovalentno vezanim jonima srebra), natrijum-hijaluronat

Datum revizije: novembar 2019.

Oestrofact® SILVER protect

Meke vaginalne kapsule

BIH/MNE

Oestrofact® SILVER protect meke vaginalne kapsule stvaraju zaštitnu barijeru sa ciljem da izoluju i štite tkivo od iritirajućih agenasa čime se pospješuje održavanje i obnavljanje normalnog fiziološkog stanja vaginalne sluznice.

Oestrofact® SILVER protect kapsule koriste se u tretmanu bakterijskih, gljivičnih i virusnih infekcija.

Oestrofact® SILVER protect je medicinsko sredstvo sa dvostrukim djelovanjem:

- izoluje tretirano područje štiteći ga od spoljašnjih patogenih mikroorganizama
- ograničava kolonizaciju mikroorganizama na tretiranoj površini, stvarajući idealne uslove za obnavljanje prirodnog fiziološkog stanja vaginalne sluzokože

Oestrofact® SILVER protect vaginalne kapsule su brzo otapajuće želatinozne kapsule.

Uputstvo za upotrebu:

1. Prije upotrebe operite intimnu regiju.
2. Umetnite meku kapsulu duboko u vaginu.
3. Ponavljajte primjenu jednom dnevno tokom sedam dana.

Medicinsko sredstvo Oestrofact® SILVER protect meke vaginalne kapsule, treba primjeniti kada se jave prvi simptomi kao što su: svrab, peckanje, neprijatnost i sl. Nije neophodno prekidati eventualnu uporednu primjenu topikalne terapije.

Upozorenja:

- Sredstvo koristite samo u slučaju da epitel nije oštećen
- Ne koristite proizvod u svrhe drugačije od

- onih navedenih u uputstvu
- Prije upotrebe pažljivo operite ruke
- Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka upotrebe navedenog na kutiji
- Čuvajte na sobnoj temperaturi i dalje od izvora toplote
- Ne zamrzavajte
- Držite van dohvata djece
- Samo za lokalnu upotrebu - ne gutati
- Ne koristite ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno
- Ne koristite u slučaju poznate preosjetljivosti na bilo koju od komponenata
- Prekinite tretman u slučaju abnormalnih kožnih reakcija
- U slučaju duže upotrebe konsultujte se sa ljekarom
- Proizvod nije spermicid niti kontraceptiv

Kontraindikacije:

Nisu zabilježeni slučajevi predoziranja. Ne koristiti u slučaju poznate preosjetljivosti na komponente. Nisu poznate interakcije sa lijekovima i drugim lijekovitim supstancama.

Uslovi čuvanja:

Držati dalje od vlage i toplote. Ako je izložen suncu, sadržaj može poprimiti blago žutu nijansu, što ne utiče na njegove funkcionalne karakteristike i rok upotrebe.

Sastav:

Kaprilni/kaprinski trigliceridi, gliceril-stearat, PEG-6 stearat (i) glikol-stearat (i) PEG-32 -stearat, ekstrakt Aloe barbadensis, TIAB® (mikrokristalni titanijum-dioksid sa kovalentno vezanim jonima srebra), natrijum-hijaluronat

Datum revizije: novembar 2019.