

**MARISOL<sup>®</sup>**  
**isotonic**

Sprej rastvor za nos 100 ml e

Izotonični rastvor morske soli

*Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo, jer ono sadrži za Vas važne informacije o upotrebi medicinskog sredstva Marisol<sup>®</sup> isotonic sprej rastvor za nos.*

*Nakon čitanja, uputstvo nemojte bacati, jer ćete možda poželeti da neke podatke ponovo pročitate. Ukoliko imate nejasnoća ili su Vam potrebne dodatne informacije o ovom medicinskom sredstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.*

Marisol<sup>®</sup> isotonic sprej rastvor za nos je izotonični rastvor morske soli. Namenjen je za primenu u svim stanjima u kojim je fiziološka funkcija nosne sluznice poremećena, kao i za održavanje svakodnevne higijene nosnih šupljina.

Marisol<sup>®</sup> isotonic sprej rastvor za nos rastvor vlaži sluzokožu nosa i pospešuje njenu sposobnost samoprečišćavanja i normalne produkcije sekreta koji je štiti od isušivanja i mehaničkih nadražaja (dima, prašine i slično).

**Kada se primenjuje Marisol<sup>®</sup> isotonic sprej rastvor za nos?**

- Za svakodnevnu higijenu nosa
- Kod osoba sa suvom i nadraženom sluznicom nosa
- Kod osoba sa nazalnom kongestijom, prehlada i rinitisa alergijskog ili nealergijskog porekla
- Tokom putovanja i boravka u prostorijama sa centralnim grejanjem i klima uređajima
- Za ispiranje nosne šupljine neposredno pre primene lekova za nazalnu primenu, u cilju ostvarivanja boljeg kontakta leka sa sluznicom nosa

**Kako se upotrebljava Marisol<sup>®</sup> isotonic sprej rastvor za nos?**

Skinuti zaštitni poklopac. Pre prve upotrebe pritisnuti raspršivač par puta dok iz bočice ne počne da izlazi ravnomerna doza spreja. Sprej se prilikom svake sledeće upotrebe može odmah koristiti. Vrh nazalnog aplikatora postaviti u nozdrvu, a zatim pritiskom na pumpicu osloboditi jednu dozu. Postupak ponoviti sa drugom nozdrvom. Prilikom ubrizgavanja, bočicu držati u vertikalnom položaju i lagano udahnuti kroz nos. Sprej se može koristiti nekoliko puta dnevno.

Nakon upotrebe, nazalni aplikator treba obrisati, osušiti i potom vratiti zaštitni poklopac.

**Prednosti primene Marisol<sup>®</sup> isotonic sprej rastvor za nos:**

Marisol<sup>®</sup> isotonic sprej rastvor za nos po svom sastavu (koncentraciji soli) i pH vrednosti odgovara fiziološkim vrednostima.

Zbog navedenih karakteristika, Marisol<sup>®</sup> isotonic sprej rastvor za nos ima odličnu podnošljivost (ne iritira i ne pecka nosnu sluznicu čak ni kada je pod upalom, odnosno, u stanjima kada je ona posebno osetljiva).

Zahvaljujući sprej formi, preparat se može primenjivati u stojećem ili sedećem položaju, što omogućava komfornu primenu, bez potrebe za naginjanjem glave unazad pri aplikaciji.

Marisol<sup>®</sup> isotonic sprej rastvor za nos mogu koristiti i deca i odrasli.

Redovno korišćenje spreja smanjuje rizik od nastanka infekcija gornjih disajnih puteva.

**Kada ne treba primenjivati Marisol<sup>®</sup> isotonic sprej rastvor za nos:**

Marisol<sup>®</sup> isotonic sprej rastvor za nos ne koristiti u slučaju preosetljivosti na neki od sastojaka proizvoda.

U retkim slučajevima, moguća je pojava alergijske reakcije kod preosetljivih osoba. U slučaju pojave alergijske reakcije na ovaj proizvod, obustaviti primenu i obavestiti lekara ili farmaceuta. Reakcije koje se mogu javiti su obično blage i po pravilu se povlače po prestanku upotrebe preparata.

**Mere opreza i upozorenja za bezbednu primenu Marisol® isotonic sprej rastvora za nos:**

Deca bi trebalo da koriste preparat samo uz nadzor odraslih.

Nakon operacije ili povrede nosa, Marisol® isotonic sprej rastvor za nos treba koristiti samo nakon konsultacije sa lekarom.

Iz higijenskih razloga svaka osoba bi trebalo da koristi svoju bočicu Marisol® isotonic sprej rastvora za nos.

Proizvod koristiti samo u originalnom pakovanju. Ne koristiti proizvod nakon isteka roka upotrebe, označenog na pakovanju.

Ne postoje druge posebne mere opreza kojih se treba pridržavati pri korišćenju Marisol® isotonic sprej rastvora za nos.

Ukoliko se pridržava preporučenog načina primene, ne očekuje se pojava neželjenih efekata.

Nema dostupnih podataka o štetnosti primene Marisol® isotonic sprej rastvora za nos u toku trudnoće i dojenja.

**Kako čuvati medicinsko sredstvo Marisol® isotonic sprej rastvor za nos:**

Marisol® isotonic sprej rastvor za nos čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C. Bočicu čuvati u uspravnom položaju, čvrsto zatvorenu, van domašaja dece.

**Rok upotrebe:** 3 godine od datuma proizvodnje.

**Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:** 6 nedelja.

**Pakovanje:**

- Složiva kartonska kutija sa plastičnom sprej bočicom koja sadrži 100 ml rastvora i uputstvo za upotrebu medicinskog sredstva.

**Šta sadrži medicinsko sredstvo Marisol® isotonic sprej rastvor za nos:**

1 ml rastvora sadrži 9 mg morske soli.

Rastvarač: prečišćena voda.

Sadrži konzervans: benzalkonijum hlorid 0,1 mg/ml.

**Broj rešenja o registraciji medicinskog sredstva u Republici Srbiji:**

515-02-00762-20-003 od 10.04.2020.

**Proizvođač medicinskog sredstva:**


ESENSA d.o.o.,

Viline vode bb, Beograd, Republika Srbija,

[www.esensa.rs](http://www.esensa.rs)

Informacije možete dobiti besplatnim pozivom iz Srbije na broj: **0800 200 300**

ili putem e-mail-a: [informacije@esensa.rs](mailto:informacije@esensa.rs)

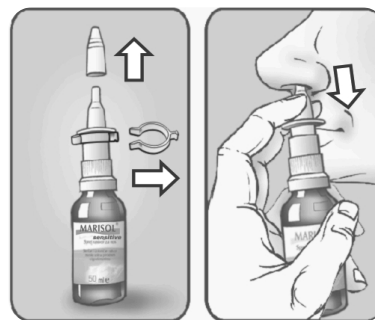

*Datum poslednje revizije uputstva za upotrebu medicinskog sredstva: Februar 2020.*



SRB

