

MARISOL[®]
sensitive

Sprej rastvor za nos 50 ml e

(izotonični rastvor morske soli sa ekstraktom lista aloe vera)

INFORMACIJE O UPOTREBI

Poštovani, pacijenti,

molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo,

jer ono sadrži za Vas važne informacije o upotrebi medicinskog sredstva Marisol.

Nakon čitanja, uputstvo nemojte bacati, jer ćete možda poželeti da neke podatke ponovo pročitate. Ukoliko imate nejasnoća ili su Vam potrebne dodatne informacije o ovom medicinskom sredstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Sastav: 1 ml spreja sadrži 50 mg tečnog ekstrakta lista aloe vera (10:1), 9 mg morske soli. Rastvarač: prečišćena voda.

Sadrži konzervans: metilparabenzil alkohol 0.1 mg/ml.

Kada deluje i kome je namenjen Marisol sensitive sprej?

Marisol sensitive sprej rastvor za nos je rastvor morske soli obogaćen ekstraktom lista Aloe vera.

Namenjen je osobama kod kojih je otežana fiziološka funkcija nosne sluzokože kao i održavanju svakodnevne higijene nosnih šupljina.

Marisol sensitive rastvor vraća sluzokoži nosa njenu prirodnu vlažnost, sposobnost samoprečišćavanja i normalne produkcije sluzi koja je štiti od isušivanja i mehaničkih nadražaja (dima, prašine, itd...). Gel poreklom iz lista Aloe vere ima protivupalno dejstvo, dovodi do smanjenja natečenosti i poboljšava proces epitelizacije kod iritirane i oštećene sluzokože nosa tokom i posle infekcija.

Pored toga, sadrži vitamine C i E, kao i cink koji smanjuje mogućnost razvoja bak

terijskih i virusnih infekcija na nivou gornjih disajnih puteva.

Zbog sposobnosti da potpuno obloži i smiri čak i najosetljiviju sluznicu nosa,

Marisol sensitive je naročito pogodan za primenu kod osoba sklonih alergijama.

Redovnim ispiranjem nosne šupljine, nekoliko puta dnevno, smanjuje se mogućnost infekcije gornjih disajnih puteva.

Kada koristiti Marisol sensitive sprej?

- za svakodnevnu higijenu nosa

- za pospešivanje epitelizacije oštećene sluzokože nosa (nakon primene vazokonstriktora)

- kod osoba sa neprohodnim disajnim putevima, virusnih prehlada i kijavica alergijskog porekla,

- kod suve i nadražene sluzokože čija je normalna fiziološka funkcija poremećena

- kod osoba koje su sklone isušivanju sluzokože disajnih puteva, tokom putovanja i boravka u prostorijama sa centralnim grejanjem i klima uređajima

- neposredno pre upotrebe kapi za nos, kako bi se isprala nosna šupljina i omogućio bolji kontakt leka sa nosnom sluzokožom

- kod iritacije kože oko nosa usled čestog korišćenja maramica

- nakon pirsinga

Kako se Marisol sensitive upotrebljava?

Odrasli i deca preko godinu dana starosti: nekoliko puta dnevno primeniti 1-2 prskanja u svaku nozdrvu.

Deca do godinu dana starosti: 1 prskanje u svaku nozdrvu nekoliko puta dnevno.

Pre prve upotrebe skinuti zaštitni prsten sa plastičnog čepa - raspršivača. Bočicu držati u vertikalnom položaju.

Skinuti zaštitni poklopac i nekoliko puta pritisnuti pumpicu dok ne izađe prvi mlaz spreja.

Vrh nazalne pumpice uvući u nozdrvu, a zatim pritisnuti pumpni mehanizam.

Pri tome bočicu držati uspravno, a glavu ne naginjati unazad. Za vreme rasprskavanja spreja lagano udahnuti kroz nos.

Nakon korišćenja vrh pumpice isprati mlazom čiste vode. Vratiti zaštitni poklopac.

Šta još morate znati o Marisol sensitive spreju i kada ga ne treba koristiti?

Nosnu sluznicu sprej ima odličnu podnošljivost (ne pecka i ne iritira nosnu sluzokožu čak ni kada je pod upalom - tada je nosna sluzokoža posebno osetljiva). Pri preporučenoj upotrebi Marisol sensitive spreja ne očekuju se neželjeni efekti.

Ne postoje posebne mere opreza za korišćenje Marisol sensitive spreja. Nema dostupnih podataka o štetnosti primene Marisol sensitive spreja u toku trudnoće i dojenja. Marisol sensitive sprej mogu koristiti i deca i odrasli. Ipak, u retkim slučajevima kod preosetljivih osoba moguće su alergijske reakcije. Reakcije su blage i po pravilu se povlače po prestanku upotrebe preparata.

Sada se vratite na sastav Marisol sensitive spreja i još jednom ga pročitate.

Ukoliko znate da ste alergični na neki od sastojaka Marisol sensitive spreja, nemojte ga upotrebljavati. Ukoliko se u toku primene javi alergijska reakcija (otok, peckanje, bol otežano disanje kroz nos), nemojte paničiti.

Prekinite upotrebu Marisol sensitive spreja i obavestite lekara ili farmaceuta.

Pročitajte i ovo:

Ne gajte i ovo: Deca ne bi trebalo da koriste preparat bez nadzora odraslih. Iz higijenskih razloga svaka osoba bi trebalo da ima svoju bočicu.

Proizvod koristite samo u originalnom pakovanju.

Ne koristite proizvod nakon isteka roka upotrebe, označenog na pakovanju.

Nepravilna upotreba može imati štetne posledice.

Čuvanje: Čuvati na temperaturi do 25°C. Van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje.

Nakon prvog otvaranja proizvod se sme koristiti najduže šest nedelja.

Pakovanje: Plastična boca sa 50ml rastvora i dozirnim nazal pumpicom.

Broj rešenja o upisu medicinskog sredstva u

Registar medicinskih sredstava:


515-02-01543-16-001 od 12.09.2016

Proizvođač i nosilac upisa medicinskog

sredstva u Registar medicinskih sredstava:

ESENSA d.o.o. Slobodna Zona Beograd, Viline vode bb,

Republika Srbija, www.esensa.rs

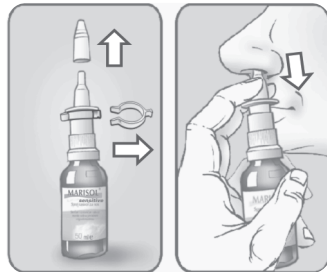

Distributer: FARMALOGIST d.o.o. Beograd,

Mirijevski bulevar 3, tel: +381 11 33 15 090

Datum poslednje revizije uputstva za upotrebu medicinskog sredstva: 10.10.2014.