

MARISOL[®]
panthenol

Sprej rastvor za nos 50 ml e

(izotonični rastvor morske soli sa Ca - D - pantotonom)

INFORMACIJE O UPOTREBI

Poštovani, pacijenti,

molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo,

jer ono sadrži za Vas važne informacije o upotrebi medicinskog sredstva Marisol.

Nakon čitanja, uputstvo nemojte bacati, jer ćete možda poželeti da neke podatke ponovo pročitate.

Ukoliko imate nejasnoća ili su Vam potrebne dodatne informacije o ovom medicinskom sredstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Sastav: 1 ml spreja sadrži 20 mg Ca-D- pantotenata, 9 mg morske soli. Rastvarač: prečišćena voda.

Sadrži konzervans: benzalkonijum hlorid 0.1mg/ml.

Kada deluje i kome je namenjen Marisol panthenol sprej?

Marisol panthenol sprej rastvor za nos je rastvor morske soli obogaćen kalcijum-D-pantotonom.

Namenjen je osobama kod kojih je otežana fiziološka funkcija nosne sluzokože kao i održavanju svakodnevne higijene nosnih šupljina.

Marisol panthenol rastvor vraća sluzokoži nosa njenu prirodnu vlažnost, sposobnost samoprečišćavanja i normalne produkcije sluzi koja je štiti od isušivanja i mehaničkih nadražaja (dima, prašine, itd.). Rastvor je obogaćen kalcijum-D-pantotonom koji poboljšava proces epitelizacije kod iritirane i oštećene sluzokože nosa. Redovnim ispiranjem nosne šupljine, nekoliko puta dnevno, smanjuje se mogućnost infekcije gornjih disajnih puteva.

Kada koristiti Marisol panthenol sprej?

- za svakodnevnu higijenu nosa

- za pospešivanje epitelizacije oštećene sluzokože nosa (nakon primene vazokonstriktora)

- kod osoba sa neprohodnim disajnim putevima, virusnih prehlada i kijavica alergijskog porekla

- kod suve i nadražene sluzokože čija je normalna fiziološka funkcija poremećena

- kod osoba koje su sklone isušivanju sluzokože disajnih puteva, tokom putovanja i boravka u prostorijama sa centralnim grejanjem i klime uređajima

- neposredno pre upotrebe kapi za nos, kako bi se isprala nosna šupljina i omogućio bolji kontakt leka sa nosnom sluzokožom

- kod iritacije kože oko nosa usled čestog korišćenja maramica

- nakon pirsinga

Kako se Marisol panthenol upotrebljava?

Odrasli i deca preko godinu dana starosti: nekoliko puta dnevno primeniti 1-2 prskanja u svaku nozdrvu

Deca do godinu dana starosti: 1 prskanje u svaku nozdrvu nekoliko puta dnevno.

Pre prve upotrebe skinuti zaštitni prsten sa plastičnog čepa raspršivača. Bočicu držati u vertikalnom položaju. Skinuti zaštitni poklopac i nekoliko puta pritisnuti pumpicu dok ne izade prvi mlaz spreja. Vrh nazalne pumpice uvući u nozdrvu, a zatim pritisnuti pumpni mehanizam. Pri tome bočicu držati uspravno, a glavu ne naginjati unazad. Za vreme rasprskavanja spreja lagano udahnuti kroz nos. Nakon korišćenja vrh pumpice isprati mlazom čiste vode. Vratiti zaštitni poklopac.

Šta još morate znati o Marisol panthenol spreju i kada ga ne treba koristiti?

Marisol panthenol sprej ima odličnu podnošljivost (ne pecka i ne iritira nosnu sluzokožu čak ni kada je pod upalom - tada je nosna sluzokoža posebno osetljiva). Pri preporučenoj upotrebi Marisol panthenol spreja ne očekuju se neželjeni efekti.

Ne postoje posebne mere opreza za korišćenje Marisol panthenol spreja.

Nema dostupnih podataka o štetnosti primene Marisol panthenol spreja u toku trudnoće i dojenja.

Marisol panthenol sprej mogu koristiti i deca i odrasli.

Ipak, u retkim slučajevima kod preosetljivih osoba moguće su alergijske reakcije.

Reakcije su blage i po pravilu se povlače po prestanku upotrebe preparata.

Sada se vratite na sastav Marisol panthenol spreja i još jednom ga pročitate.

Ukoliko znate da ste alergični na neki od sastojaka Marisol panthenol spreja, nemojte ga upotrebljavati.

Ukoliko se u toku primene javi alergijska reakcija (otok, peckanje, bol, otežano disanje kroz nos), nemojte paničiti.

Prekinite upotrebu Marisol panthenol spreja i obavestite lekara ili farmaceuta.

Pročitajte i ovo:

Ne gutati. Deca ne bi trebalo da koriste preparat bez nadzora odraslih.

Iz higijenskih razloga svaka osoba bi trebalo da ima svoju bočicu.

Proizvod koristite samo u originalnom pakovanju.

Ne koristite proizvod nakon isteka roka upotrebe, označenog na pakovanju.

Nepravilna upotreba može imati štetne posledice.

Čuvanje: Čuvati na temperaturi do 25°C. Van domašaja dece.

Rok upotrebe: 3 godine od datuma proizvodnje.

Nakon prvog otvaranja proizvod se sme koristiti najduže šest nedelja.

Pakovanje: Plastična boca sa 50 ml rastvora i dozirnom nazal pumpicom.

Broj rešenja o upisu medicinskog sredstva u

Registar medicinskih sredstava:

515-02-0132-12-001 od 06.03.2013.

Proizvođač i nosilac upisa medicinskog

sredstva u Registar medicinskih sredstava:

ESENSA d.o.o. Slobodna Zona Beograd, Viline vode bb,


Republika Srbija, www.esensa.rs

Distributer: FARMALOGIST d.o.o. Beograd,

Mirijevski bulevar 3, tel: +381 11 33 15 090

CE

esensa

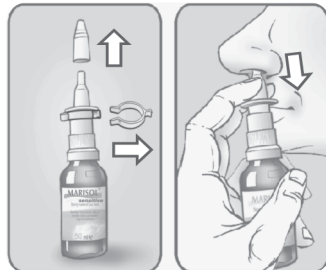

Datum poslednje revizije uputstva za upotrebu medicinskog sredstva: 10.10.2014.