

**MARISOL**<sup>®</sup>  
**hypertonica**

# Sprej rastvor za nos 50 ml e

(hipertonični rastvor morske soli)

## INFORMACIJE O UPOTREBI

Poštovani, pacijenti,

molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo,

jer ono sadrži za Vas važne informacije o upotrebi medicinskog sredstva Marisol.

Nakon čitanja, uputstvo nemojte baciti, jer ćete možda poželeti da neke podatke ponovo pročitate.

Ukoliko imate nejasnoća ili su Vam potrebne dodatne informacije o ovom medicinskom sredstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.

**Sastav:** 1 ml spreja sadrži 37mg morske soli. Rastvarač: prečišćena voda. Sadrži konzervans: benzalkonijum hlorid 0.1mg/ml.

### **Kada deluje i kome je namenjen Marisol hypertonica sprej?**

Marisol hypertonica sprej rastvor za nos je hipertonični rastvor koji se odlikuje jedinstvenim sadržajem morske soli. Koncentracija soli u ovom rastvoru odgovara salinitetu morske vode. Pošto je rastvor po tipu hipertoničan, u poređenju sa fiziološkim tečnostima čoveka sadrži više soli. Ovakav tip rastvora posle primene na otečenu sluzokožu nosa, brzo i efikasno „izvlači“ tj. drenira vodeni sadržaj, usled čega se otok sluzokože nosa brzo smanjuje i disanje je olakšano. Dreniranje nastaje kao rezultat osmotskog efekta hipertoničnog rastvora. Namenjen je osobama kod kojih je otežana normalna fiziološka funkcija nosne sluzokože. Marisol hypertonica rastvor brzo olakšava tegobe kod zapušenog nosa, a da pritom ne postoje ograničenja za dužinu njegove primene, jer ne oštećuje sluzokožu nosne šupljine i ne dovodi do pojave tolerancije.

### **Kada koristiti Marisol hypertonica sprej?**

- kod zapušenog nosa
- kod akutnog zapaljenja sluznice nosa
- kod osoba sa neprohodnim disajnim putevima, virusnih prehlada i kijavica alergijskog porekla (alergijski rinitis)
- kod upale sinusa (hronični sinuzitis)
- pre upotrebe kortikosteroidnih nazalnih lekova
- za ublažavanje posledica dugotrajne primene kapi za nos koje sadrže vazokonstriktore
- kod problema sa hrkanjem

### **Kako se Marisol hypertonica upotrebljava?**

Odrasli i deca preko 2 godine starosti: nekoliko puta dnevno primeniti 1-2 prskanja u svaku nozdrvu.

Odojčad i deca do 2 godine starosti: 1 prskanje u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno.

Pre prve upotrebe skinuti zaštitni prsten sa plastičnog čepa - rasprašivača. Bočicu držati u vertikalnom položaju. Skinuti zaštitni poklopac i nekoliko puta pritisnuti pumpicu dok ne izađe prvi mlaz spreja. Vrh nazalne pumpice uvući u nozdrvu, a zatim pritisnuti pumpni mehanizam. Pri tome bočicu držati uspravno, a glavu ne naginjati unazad. Za vreme rasprskavanja spreja lagano udahnuti kroz nos. Nakon korišćenja vrh pumpice isprati mlazom čiste vode. Vratiti zaštitni poklopac.

### **Šta još morate znati o Marisol hypertonica spreju i kada ga ne treba koristiti?**

Marisol hypertonica sprej ima odličnu podnošljivost i ne postoje ograničenja za dužinu njegove primene, jer ne oštećuje sluzokožu nosne šupljine i ne dovodi do pojave tolerancije.

Pri preporučenoj upotrebi Marisol hypertonica spreja ne očekuju se neželjeni efekti.

Ne postoje posebne mere opreza za korišćenje Marisol hypertonica spreja. Marisol hypertonica sprej mogu koristiti i deca i odrasli.

Nema dostupnih podataka o štetnosti primene Marisol hypertonica spreja u toku trudnoće i dojenja.

Ipak, u retkim slučajevima kod preosetljivih osoba moguće su alergijske reakcije.

Reakcije su blage i po pravilu se povlače po prestanku upotrebe preparata.

### **Sada se vratite na sastav Marisol hypertonica spreja i još jednom ga pročitate.**

Ukoliko znate da ste alergični na neki od sastojaka Marisol hypertonica spreja, nemojte ga upotrebljavati.

Ukoliko se u toku primene javi alergijska reakcija (otok, peckanje, bol, otežano disanje kroz nos), nemojte paničiti.

Prekinite upotrebu Marisol hypertonica spreja i obavestite lekara ili farmaceuta.

### **Pročitajte i ovo:**

Ne gutati. Deca ne bi trebalo da koriste preparat bez nadzora odraslih.

Iz higijenskih razloga svaka osoba bi trebalo da ima svoju bočicu.

Proizvod koristite samo u originalnom pakovanju.

Ne koristite proizvod nakon isteka roka upotrebe, označenog na pakovanju.

Nepravilna upotreba može imati štetne posledice.

**Čuvanje:** Čuvati na temperaturi do 25°C. Van domašaja dece.

**Rok upotrebe:** 3 godine od datuma proizvodnje.

Nakon prvog otvaranja proizvod se sme koristiti najduže šest nedelja.

**Pakovanje:** Plastična boca sa 50 ml rastvora i dozirnim nazal pumpicom.

**Broj rešenja o upisu medicinskog sredstva u**


**Registar medicinskih sredstava:**

515-02-0132-12-001 od 06.03.2013.

**Proizvođač i nosilac upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava:**

ESENSA d.o.o. Slobodna Zona Beograd, Viline vode bb, Republika Srbija, www.esensa.rs

**Distributer:** FARMALOGIST d.o.o. Beograd, Mirijevski bulevar 3, tel: +381 11 33 15 090

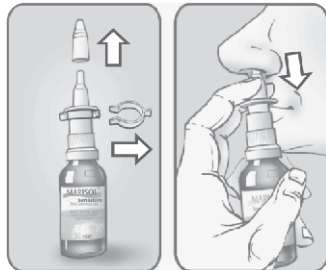

**Datum poslednje revizije uputstva za upotrebu medicinskog sredstva:** 10.10.2014.